



Tipo do Documento	<b>PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO</b>	POP.28.001 - Página 1/2	
Título do Documento	<b>FITA ADESIVA INDICADORA (zebrada)</b>	Emissão:	Próxima revisão:

## OBJETIVO

A fita zebrada para autoclave é um material cujo uso é realizado em processos de monitoramento de esterilização.

## MATERIAL


- Pacote com materiais a serem esterilizados;
- Fita zebrada;
- Tesoura;
- EPI (luva, touca, jaleco, máscara)

## DESCRIÇÃO DOS PROCEDIMENTOS

1. Lavar as mãos;
2. Colocar os EPI's;
3. Identificar e fixar a fita termossensíveis nos pacotes que serão submetidos esterilização;
4. Cortar com tesoura 10 cm, ou (pedaço) da fita contendo 3 tiras transversais termossensível e aderir junto a etiqueta identificadora;
5. Higienizar as mãos.

\*Atentar para materiais embalados em grau cirúrgico (deverá ser utilizado a fita para fixar etiqueta padrão de identificação).



<b>ETIQUETA ESTERILIZAÇÃO</b>	 <b>PREFEITURA DE BRUSQUE</b> Saúde
Data: ___/___/___	Validade: ___/___/___
Autoclave n°: _____	LOTE: _____
Material: _____	_____
Responsável: _____	_____





### Leitura

Após esterilização, verificar se houve mudança na coloração das listras transversais de cor amarelo ou vermelho, para marrom ou preto indicando condições ideais de pressão, temperatura e tempo.

### Cuidados

1. A mudança de coloração das listras de amarelo para preto indica que o pacote foi exposto ao processo de esterilização à vapor, porém não significa que o processo foi suficiente para se chegar à esterilidade do material.
2. Outros indicadores determinarão a esterilidade do material.
3. Armazenar a fita zebra em ambiente seco, a uma temperatura ambiente de 15 a 30°C e proteger da luz solar direta.

**Importante:** A fita adesiva não pode ser utilizada para fechamento de pacote Papel Grau Cirúrgico.

### REFERÊNCIAS

- 01. ANVISA. Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Resolução da Diretoria Colegiada – RDC nº 15, de 15 de março de 2012.
- 02. SOBECC/Sociedade Brasileira de Enfermeiros de Centro Cirúrgico, Recuperação Anestésica e Centro de Material Esterilizado. 7ª edição. São Paulo: SOBECC, 2017.

### HISTÓRICO DE REVISÃO

VERSÃO	DATA	DESCRIÇÃO DA ALTERAÇÃO
		<b>Elaboração:</b> Danieli Martins Debrassi – Enfermeira Responsável Técnica – COREN-SC 213588
		<b>Data:</b> 24/08/2024
		<b>Revisão:</b> Beatriz Pereira Kuster – Enfermeira auditora – Coren-SC 158731
		<b>Data:</b> 24/09/2024
		<b>Validação:</b> Victor Sardo – Diretor Geral da Saúde
		<b>Data:</b> 27/09/2024
		<b>Aprovação:</b> Thayse Rosa – Secretária Municipal de Saúde
		<b>Data:</b> 27/09/2024





PREFEITURA DE  
**BRUSQUE**



SECRETARIA DE  
**SAÚDE**

